

هو اختبار يستخدم لتحديد حاسه الشم لدى المريض ويتكون من اربع كتيبات كل كتيب يحتوي على ١٠ اسئلة بمجموع ٤٠ سؤال

يستغرق الاختبار ١٠-١٥ دقيقة من وقتك

في كل صفحة من الكتيب هناك سؤال واحد ومرعب بني اللون يتم خدشه بقلم رصاص مرفق مع الكتيبات ينتج عن ذلك رائحة معينة يتم شمها والتعرف عليها والاجابه على السؤال المرفق

يتوجب عليك بالاجابه على الاسئلة حتى وان لم يتم التعرف على الرائحة الناتجة للخدش

يتم معرفه النتيجة على حسب عمر وجنس المريض بعد الفحص من قبل الطبيب المعالج

(The Smell Identification Test™) اختبار تحديد الشمّ علامة تجارية



يرجى قراءة التعليمات التالية **بتمعن** قبل الابتداء في الإجابة على الأسئلة.

1. إملأ المعلومات المطلوبة في الغلاف الخلفي بقلم الرصاص المرفق. يرجى الكتابة بخط واضح.
2. ابتداءً من الصفحة الأولى من هذا الكتيب (الكتيب الأول)، استخدم قلم الرصاص لخدش العلامة ذات اللون البني من اليسار إلى اليمين مرات عديدة (انظر إلى الصورة). سيطلق هذا الرائحة.
3. شم العلامة المخدوشة وإملأ بشكل كامل الدائرة المشابهة لهذه الرائحة في العمود الموجود على اليسار. إحرص على محو الأخطاء بشكل كامل. إذا كانت الرائحة التي شممتها غير موجودة، فقم بتعليم الدائرة الأقرب لهذه الرائحة. إذا لم تشم شيئاً، فعليك أن تتحرّر وتعلم جواباً واحداً. يجب عليك أن تعلم جواباً واحداً لكل سؤال (حتى ولو لم تشم شيئاً) لكي تجعل هذا الاختبار صالحاً.
4. بعد الإجابة على كل الأسئلة العشرة في هذا الكتيب، يجب عليك إكمال الكتيبات الثلاثة الأخرى بالترتيب (أي من الكتيب الثاني إلى الكتيب الرابع).
5. ضع الكتيبات الأربعة بعد إكمال الإجابة عليها وقلم الرصاص الخاص بك في الظرف وأرجعه إلى المسؤول عن الاختبار. يُرجى التأكد بأن الإجابة قد تمت على كل سؤال من الأسئلة الأربعين وأن المعلومات المطلوبة في الغلاف الخلفي من كل كتيب قد تمّ ملئها بشكل كامل. مع جزيل الشكر.

Arabic Version  
Booklet 1 of 4



الكتيب الأول من أربعة كتيبات